

# Zestica<sup>MC</sup> moisture

Lubrifiant vaginal hydratant  
Pour le soulagement rapide  
de la sécheresse.

**Zestica Moisture** est un lubrifiant vaginal sans hormones qui agit en harmonie avec l'organisme.

La plupart des femmes éprouvent une sécheresse vaginale de temps en temps, surtout lors de changements hormonaux, en périodes de fatigue et de stress ou parfois sous l'effet de médicaments. La sécheresse vaginale peut occasionner de l'irritation et de l'inconfort.

**Zestica Moisture** contient de l'acide hyaluronique, qui est l'un des principaux éléments des sécrétions vaginales et qui aide l'organisme à rester hydraté. Le produit a une consistance très légère, ayant été conçu pour que l'utilisatrice se sente à nouveau confortable et naturelle. Le produit est limpide, inodore, non gluant, sans parabène et facile à utiliser.

**À quel moment l'utiliser:** Pour aider à combattre la sécheresse, utiliser **Zestica Moisture** tous les jours pendant cinq jours, puis en réduire l'utilisation à deux ou trois fois par semaine au besoin.



**Mode d'emploi:** Il est conseillé d'utiliser **Zestica Moisture** le matin ou en soirée (utiliser des protège-dessous si nécessaire jusqu'à ce que la quantité appropriée par application ait été déterminée). Enlever la languette, se placer dans une position assise ou couchée confortable et insérer doucement l'applicateur dans le vagin aussi loin que possible. Exercer une pression sur l'applicateur pour en faire sortir **Zestica Moisture**. Retirer soigneusement l'applicateur et le mettre au rebut.

**Pour l'utilisation avec un condom: Zestica Moisture** peut s'appliquer sur l'extérieur du condom avant les rapports sexuels. Compatible avec les condoms faits de latex ou de polyuréthane.

**Ingrédients:** Solution saline dans un tampon phosphate, hyaluronate de sodium, phénoxyéthanol.

🌡️ Conserver à une température entre 5 et 30° C.

♻️ Jetable après usage

**Avertissements:** Ne pas utiliser si la languette est brisée. Les applicateurs vaginaux sont conçus pour être utilisés une fois seulement; la réutilisation pourrait entraîner une infection. Cesser d'utiliser le produit en cas d'irritation. Garder hors de la portée des enfants.

**Fabricant:**  
Bescot Healthcare UK Limited  
272 Bath Street  
Glasgow G2 4JR UK

**Distribué par:**  
Pharmaceutique Searchlight  
Montréal, QC  
Canada H3J 1M1  
[www.searchlightpharma.com](http://www.searchlightpharma.com)

[www.ZesticaMoisture.ca](http://www.ZesticaMoisture.ca)

